



dermasun
medical

SAMENVATTING

81% van de patiënten die Dermasun Medical gebruiken, geeft een 7 of hoger voor het resultaat van de therapie.

Dermasun Medical ontwikkelde in samenwerking met dermatologen een nieuwe vorm van UVB thuisbelichting op basis van een ultra lage dosis breedband UVB (6 j/m²). Dermasun Medical biedt geen lichtkuur aan, maar een onderhoudstherapie.

Dermasun Medical doet voortdurend onderzoek naar de effecten van de therapie en de patiënttevredenheid. Recent patiëntenonderzoek maakt duidelijk dat 81%

van de patiënten tevreden tot zeer tevreden is met de resultaten van de lichttherapie van Dermasun Medical (score 7 of hoger op een schaal van 1 tot 10). Een kleine minderheid (10%) van de patiënten geeft aan dat het gewenste effect uitbleef (score 5 of lager op een schaal van 1 tot 10). 69% van alle patiënten die de UVB-lichttherapie van Dermasun Medical inmiddels een jaar thuis toepassen, hebben hun contract verlengd. Ook zien we een stijging in het aantal patiënten dat de Dermasun particulier aanschaft. In gesprekken met dermatologen komt naar voren dat tevreden patiënten hen minder vaak benaderen.

ONDERZOEKSVRAGEN EN METHODE

Dermasun Medical is in 2013 een onderzoek gestart om het daadwerkelijke gebruik van de apparaten en de ervaringen van de patiënten helder in beeld te brengen, met een vervolgrapportage in 2014 en 2015. Dermasun Medical benaderde 420 gebruikers van de UVB-lichttherapie. Hen werd telefonisch een vragenlijst voorgelegd, na maand 1, 3, 5, 7 en 11 van de behandeling. Op de achterzijde staat de volledige vragenlijst.

Het doel van dit onderzoek is tweeledig:

Ten eerste om te onderzoeken in hoeverre de patiënten het apparaat volgens de voorschriften gebruiken.

Ten tweede om inzichtelijk te krijgen wat het therapeutisch resultaat in de ogen van de patiënten zelf is. Zij kunnen op een schaal van 1 t/m 10 aangeven hoe tevreden zij zijn.

RESULTATEN

Aandoeningen. 72% van de patiënten die Dermasun Medical gebruiken heeft psoriasis, 19% heeft eczeem, 3% heeft zonneallergie en 6% gebruikt Dermasun Medical voor overige aandoeningen.

Belichtingstijd. De door de patiënt opgegeven belichtingstijd is gemiddeld 50 minuten per week (standaard deviatie 19). Veruit de meeste patiënten (75%) houden zich aan de voorgeschreven wekelijkse belichtingstijd van tenminste 35 minuten. Niet iedereen blijkt echter evenveel UVB-licht nodig te hebben voor een goed resultaat. Zo blijkt 25% van de deelnemers een heel goed resultaat te behalen met minder UVB-licht dan aanbevolen.


Patiënttevredenheid. 81% scoort een zeven of hoger en 50% scoort een acht of hoger. Patiënten rapporteren twee maanden na de start van de therapie een vermindering van jeuk, roodheid, grootte en dikte van de plakken en schilfering. Combinatietherapie met corticosteroiden

komt regelmatig voor. Slechts 10% van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat het gewenste effect uitblijft. Dit lijkt in de meeste gevallen te wijten aan een lage therapie trouw of een behoefte aan een hogere dosis UV licht. Een lamp van Dermasun Medical kan in de hoek van de douche gemonteerd worden, en tijdens het douchen gebruikt worden. 44% van de patiënten kiest voor deze montage optie.


De apparaten van Dermasun Medical worden voor de duur van een jaar bij de patiënt thuis in bruikleen geplaatst. Na het eerste jaar kan men verlengen met telkens één jaar. 69% van alle patiënten die de UVB-lichttherapie van Dermasun Medical inmiddels een jaar thuis toepassen, hebben hun contract verlengd.

Uit het patiëntenonderzoek blijkt verder dat ontevreden patiënten vaker contact zoeken met hun dermatoloog dan tevreden patiënten.

PATIËNTTEVREDENHEID N = 420

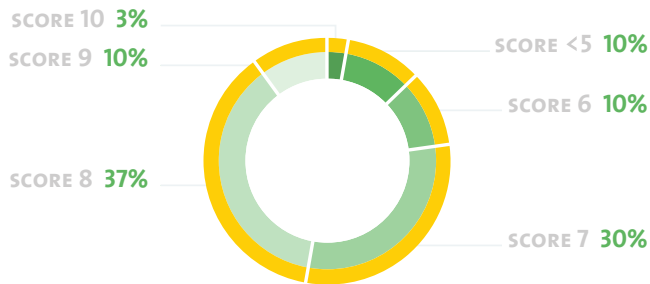

VERLENGINGSPERCENTAGE

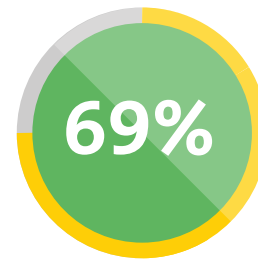

69% VAN DE BEHANDELINGEN WORDT VERLENGD NA HET EERSTE JAAR

31% VAN DE BEHANDELINGEN WORDT BEËINDIGD NA HET EERSTE JAAR

VRAGEN PATIËNTTEVREDENHEIDONDERZOEK

1. In welke maand bent u begonnen met de therapie?
2. Waar in uw huis is het apparaat geïnstalleerd?
3. Hoe ver staat u gemiddeld van het apparaat?
4. Welk huidtype heeft u?
5. Hoeveel keer per week gebruikt u het apparaat gemiddeld?
6. Hoeveel minuten per dag gebruikt u het apparaat gemiddeld?
7. Indien u afwijkt van het belichtingsschema, kunt u toelichten waarom u dat doet?
8. Wat is het effect van de therapie op uw klachten?
9. Werkt het apparaat technisch gezien naar volle tevredenheid?
10. Zo niet, wat kan er verbeterd worden aan de werking van het apparaat?
11. Wat voor bij-effecten van de lichttherapie ervaart u?
12. Welke medicijn(en) gebruikte u voordat u met de Dermasun therapie begon?
13. Hoeveel medicijnen gebruikte u typisch voordat u met de Dermasun therapie begon?
14. Gebruikt u meer, even veel of minder medicijnen die u voorheen gebruikte in combinatie met deze Dermasun therapie?
15. Op een schaal van 1 tot 5, in welke mate heeft u last van uw huidandoening?
16. Op een schaal van 1 tot 10, kunt u een rapportcijfer geven voor het resultaat van deze behandeling?
17. Bent u van plan verlenging van de therapie aan te vragen aan uw dermatoloog na 1 jaar gebruik?
18. Zo niet, waarom niet?