

SAMENVATTING

81% van de patiënten die Dermasun Medical gebruiken, geeft een 7 of hoger voor het resultaat van de therapie.

Dermasun Medical ontwikkelde in samenwerking met dermatologen een nieuwe vorm van UVB thuisbelichting op basis van een ultra lage dosis breedband UVB (6 j/m²). Dermasun Medical biedt geen lichtkuur aan, maar een onderhoudstherapie.

Dermasun Medical doet voortdurend onderzoek naar de effecten van de therapie en de patiënttevredenheid. Recent patiëntenonderzoek maakt duidelijk dat 81% van de patiënten

tevreden tot zeer tevreden is met de resultaten van de lichttherapie van Dermasun Medical (score 7 of hoger op een schaal van 1 tot 10). Een kleine minderheid (9%) van de patiënten geeft aan dat het gewenste effect uitbleef (score 5 of lager op een schaal van 1 tot 10). 67% van alle patiënten die de UVB-lichttherapie van Dermasun Medical inmiddels een jaar thuis toepassen, hebben hun contract verlengd. Ook zien we een stijging in het aantal patiënten dat de Dermasun particulier aanschaft. In gesprekken met dermatologen komt naar voren dat tevreden patiënten hen minder vaak benaderen.


METHODE

Dermasun Medical is in 2015 een onderzoek gestart om het daadwerkelijke gebruik van de apparaten en de ervaringen van de patiënten helder in beeld te brengen, met een vervolgrapportage in 2016, 2017 en 2018. Dermasun medical benaderde 360 gebruikers van de UVB-lichttherapie. Hen werd telefonisch een vragenlijst voorgelegd, na maand 2, 6 en 11 van de behandeling. Niet iedereen heeft op alle vragen antwoord gegeven. Hier is rekening mee gehouden bij de analyse van de resultaten.

Het doel van dit onderzoek is tweeledig: Ten eerste om te onderzoeken in hoeverre de patiënten het apparaat volgens de voorschriften gebruiken. Psoriasispatiënten worden aangemoedigd om het apparaat dagelijks, 10 minuten per dag te gebruiken. Bij eczeem, zonneallergie en overige patiënten is dat minder. Ten tweede om inzichtelijk te krijgen wat het therapeutisch resultaat in de ogen van de patiënten zelf is. Zij kunnen op een schaal van 1 t/m 10 aangeven hoe tevreden zij zijn.

RESULTATEN


Aandoeningen

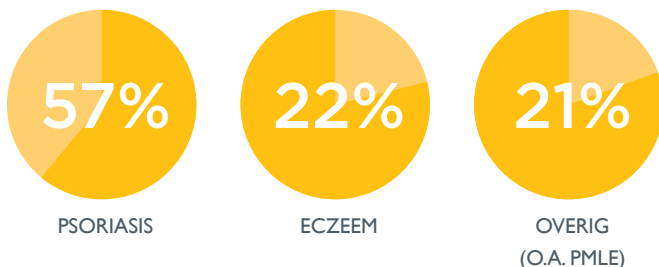

Gebruikersgedrag - De door de patiënt opgegeven belichtingstijd is gemiddeld 45 minuten per week. Geen van de patiënten belicht meer dan de aanbevolen belichtingstijd. Het grootste deel van de patiënten houdt zich aan de aanbevolen afstand van 30 cm. Combinatietherapie met corticosteroiden komt regelmatig voor. Slechts 9% van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat het gewenste effect uitblijft. Dit lijkt in de meeste gevallen te wijten aan een lage therapie trouw of een behoefte aan een hogere dosis UV licht.


Patiënttevredenheid - 81% scoort een zeven of hoger en 55% scoort een acht of hoger. Patiënten rapporteren twee maanden na de start van de therapie een vermindering van jeuk, roodheid, grootte en dikte van de plakken en schilfering. Een lamp van Dermasun medical kan in de hoek van de douche gemonteerd worden, en tijdens het douchen gebruikt worden. 39% van

PATIËNTTEVREDENHEID N=338

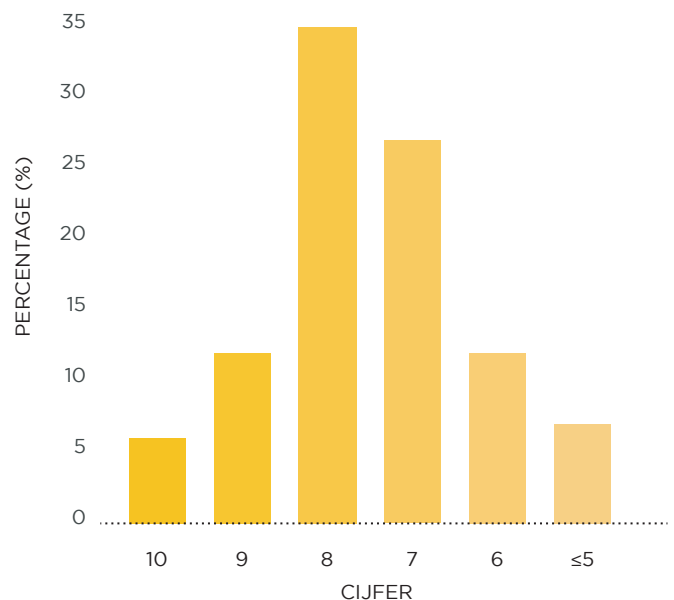

de patiënten kiest voor deze montage optie. (45% heeft de Dermasun in de slaapkamer of elders buiten de badkamer staan, de therapie trouw van deze patiënten is significant minder dan patiënten waarbij de Dermasun in de badkamer is geïnstalleerd.)

REDENEN VOOR NIET VERLENGEN

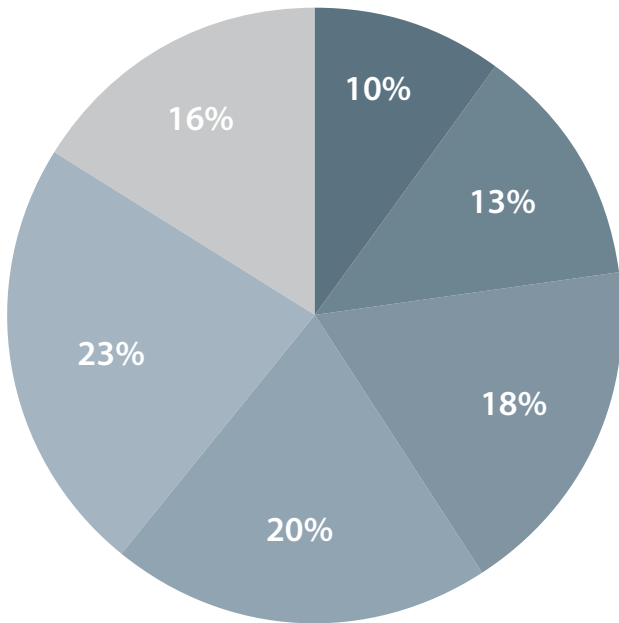

- OVERNAME DOOR PATIËNT
- ONVOLDOENDE THERAPIEGETROUW
- VERTROUWEN ARTS
- LANGDURIG WEGBLIJVEN SYMPTOMEN
- ONVOLDOENDE EFFECT
- OVERIG

De apparaten van Dermasun Medical worden voor de duur van een jaar bij de patiënt thuis in bruikleen geplaatst. Ruim 67% van de patiënten heeft verlengd na het eerste jaar. De meest voorkomende redenen dat er de therapie niet verlengd wordt zijn vanwege zodanig effect dat de therapie niet meer nodig is, het vertrouwen van artsen of onvoldoende therapeutisch effect. Uit het patiëntenonderzoek blijkt verder dat ontevreden patiënten vaker contact zoeken met hun dermatoloog dan tevreden patiënten.

VRAGEN PATIËNTEVREDENHEIDSONDERZOEK

1. In welke maand bent u begonnen met de therapie?
2. Waar in uw huis is het apparaat geïnstalleerd?
3. Hoe ver staat u gemiddeld van het apparaat?
4. Welk huidtype heeft u?
5. Hoeveel keer per week gebruikt u het apparaat gemiddeld?
6. Hoeveel minuten per dag gebruikt u het apparaat gemiddeld?
7. Indien u afwijkt van het belichtingsschema, kunt u toelichten waarom u dat doet?
8. Wat is het effect van de therapie op uw klachten?
9. Werkt het apparaat technisch gezien naar volle tevredenheid?
10. Zo niet, wat kan er verbeterd worden aan de werking van het apparaat?
11. Wat voor bij-effecten van de lichttherapie ervaart u?
12. Welke medicijnen gebruikte u voordat u met de Dermasun therapie begon?
13. Hoeveel medicijnen gebruikte u gewoonlijk voordat u met de Dermasun therapie begon?
14. Gebruikt u nu meer, even veel of minder medicijnen die u voorheen gebruikte in combinatie met deze Dermasun therapie?
15. Op een schaal van 1 tot 5, in welke mate heeft u last van uw huidaanandoening?
16. Op een schaal van 1 tot 10, kunt u een rapportcijfer geven voor het resultaat van deze behandeling?
17. Bent u van plan verlenging van de therapie aan te vragen aan uw dermatoloog na 1 jaar gebruik?
18. Zo niet, waarom niet?